



GRÚA MANUAL BYPALA SPA

INSTRUCCIONES GRÚA MANUAL:

GRÚA MANUAL está diseñada para soportar el peso de una persona y su traslado dentro del área que el puente grúa o monorraíl lo limite. Puede ser manipulada por la misma persona que necesita traslado o con ayuda de un asistente. Recomendada para el traslado seguro y fácil de personas en tratamiento provisorio, con movilidad reducida, adultos mayores o quien la necesite.

GRÚA MANUAL viene en un kit con accesorios estándar, pero el puente grúa o monorraíl y el arnés será diseñado según la necesidad del usuario.



CARACTERISTICAS:

- Max. Capacidad de carga 135 kg.
- Desplazamiento solo lineal y/o área total entre rieles de soporte y de riel móvil; Ej. 4 m2.
- Permite auto-manipulación.
- Desplazamiento suave y silencioso.
- Reduce en más de un cuarto el peso a levantar una persona.
- Se puede adaptar mediante estructuras metálicas a todo tipo de construcciones.
- Deja espacios libres de tránsito en comparación con otros sistemas de la competencia.
- Con correcto uso y almacenamiento de sus componentes permite una larga vida útil.
- Garantía de las piezas metálicas de Grúa Manual de 3 años.
- Prácticamente no necesita mantenimiento.
- Fácil manipulación.
- Diseño optimizado para brindar mayor funcionalidad en actividades diarias.



USO ADECUADO DE GRÚA MANUAL

1. Antes de levantar al usuario:
 - Asegúrese que las eslingas no estén enrolladas.
 - asegurarse que todas las piezas estén en su lugar y en la posición correcta para evitar desplazamientos bruscos hacia abajo por acomodo de lugar de las piezas.
 - Eslinga corta en espalda bajo axilas (la que tiene la marca ByPala) y eslinga larga detrás de rodillas.
 - Si te levantas solo, deja el freno con la cuerda al lado de tu mano con mayor fuerza (esto hará más fácil poner y sacar el freno)
 - Use mosquetones independientes para cada eslinga y asegúrese que estén bien cerrados.

2. Al levantar al usuario:
 - Comience a subir la persona tirando la cuerda de alzado y frenando en cada descanso.
 - El freno de la cuerda se produce por trabazón en dientes de pieza superior FRENO al apegar cuerda hacia la grúa manual.

3. Una vez alanzada la altura deseada:
 - Tome la grúa con la mano y puede trasladar la persona suavemente a su destino (si la persona se alza sola, deberá asegurarse de tener donde tomarse para llegar al lugar deseado).

4. En el destino:
 - Compruebe que la cuerda este libre y desenroscada;
 - Aléjela cuerda para liberar del freno y baje suavemente.
 - Se puede bajar por tramos frenando o de una sola vez suavemente.
 - Una vez finalizado el uso retire eslingas con cuidado y guarde su grúa en un lugar seguro y seco.



PIEZAS DE LA GRÚA MANUAL

GRÚA
MANUAL

PUENTE
GRÚA


FRENO

MOSQUETONES

CUERDA DE LEVANTE
CON MANILLA

ESLINGA CORTA
(Marca ByPala)

ESLINGA LARGA

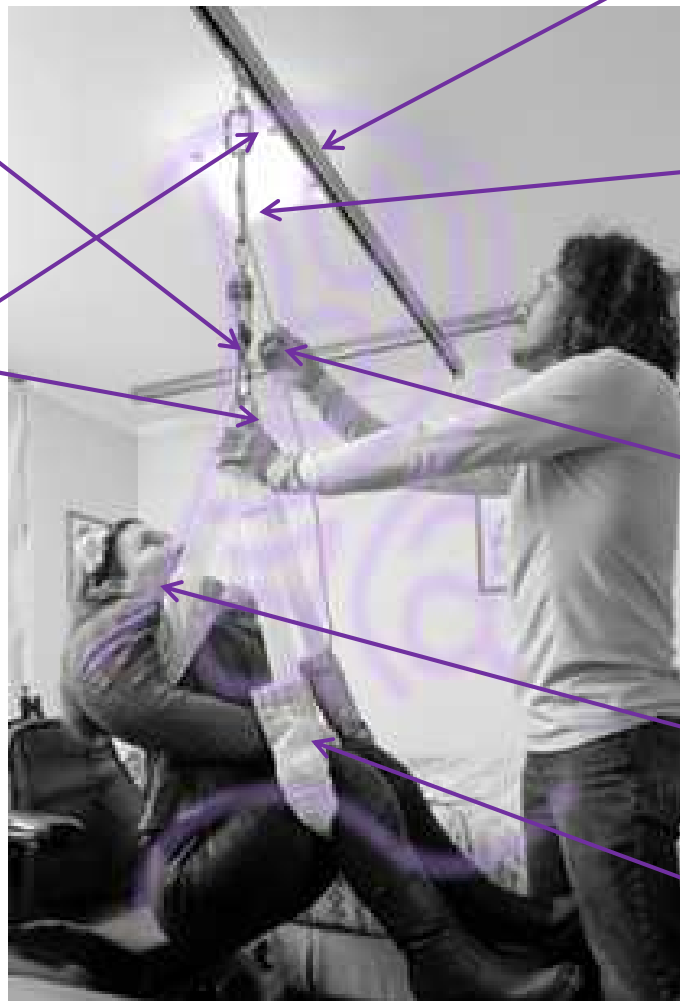



RECOMENDACIONES DE USO DE GRÚA MANUAL BYPALA

- Usar GRÚA MANUAL solo con el fin de trasladar una persona a la vez.
- Jamás debe ser desarmado el aparejo de GRÚA MANUAL.
- Evite movimientos bruscos en su utilización.
- Se pueden usar nudos en cuerdas para efectos de regular distancias, siempre que no afecte el movimiento normal de GRÚA MANUAL.
- La grúa posee incorporado un sistema de freno manual, el cual debe saber manejar adecuadamente para su seguridad.
- Antes de mover al usuario asegurarse que el freno este puesto y que las cuerdas no estén enredadas.
- Aleje y guarde fuera del alcance de los niños.
- El kit estándar de GRÚA MANUAL viene con un par de eslingas básicas, pero contamos con otro tipo de arneses según la necesidad del usuario (se venden por separado).
- En etapa de instalación se deja nudo de seguridad al final de cuerda de alzado, se recomienda no desarmarlo.
- Mantener riel limpio y libre de polvo.
- BYPALA SPA no se hace responsable del mal uso GRUA MANUAL y sus componentes.
- Ante cualquier duda de operación de GRUA MANUAL favor contactarnos a la brevedad.



ByPala SPA

Todos los derechos reservados

www.bypala.cl

+56 9 8289 1117